



Table with 15 columns: Analytbezeichnung, Untersuchungsmaterial (Matrix), Untersuchungstechnik, Analyt-Code, Gerät, Ab Bilirubin-Index, Hyperbilirubinämie in mg/dl, Analyt-Konzentration, Bewertung, Ab HB-Index, Hämozyse in mg/dl, Analyt-Konzentration, Bewertung, Ab Lipämie-Index, Lipämie in mg/dl, Analyt-Konzentration Intra lipid, Bewertung, and Andere Störgrößen. Rows include various clinical tests like Vitamin D, ACE, ACTH, Albumin, Amylase, ANA-Profil, etc.

Parameter	Anteil	Chemilumineszenz-IA	zCA125C	Atellica IM	-,*	bis 20 (konj.)	-6,8 %	1000	0,7 %		900 (Triglyzeride)	-5,7 %	
Cancer Antigen 125 (CA 125)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zCA125C	Atellica IM	-,*	bis 20 (unikonj.)	2,4 %						
Cancer Antigen 15.3 (CA 15-3)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zCA15-3C	Atellica IM	-.+,+ +	25 (konj.)	-4,7 %						
Carbamazepin	Serum	Immunturbidimetrie (PETINIA)	zCARAC	Atellica CH	+	20 (konj.)	0 %	500	3,0 µg/ml	1 %	++++	800	2,9 µg/ml
						20 (konj.)	12,5 µg/ml	500	12,3 µg/ml	2 %		800	12,3 µg/ml
						20 (unikonj.)	2,9 µg/ml						
						20 (unikonj.)	12,4 µg/ml						
Carbohydrat Antigen 19-9 (CA 19-9)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zCA19-9C	Atellica IM	-.+,+ + +	bis 50	≤ 4,0						
Carcinoembryonales Antigen (CEA)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zCEAC	Atellica IM	-.+	bis 20 (konj.)	≤ 5 %	1200	≤ 4,0		3000 (Triglyzeride)	≤ 4,0	
						bis 20 (unikonj.)	≤ 5 %	500	≤ 5 %		1000 (Triglyzeride)	≤ 5 %	
CD71-Profil (anti-SSA/B, SmD, U1-RNP/AC, Scl-70, CENP-B, Jo-1, ds-DNA, Rib-P, PCNA, Fibrinogen, RNA Pol, IL1M2, PM-Sc1)	Serum	Immunnephelometrie	zCD71	BN-II			k.A.						k.A.
	Serum	Enzymimmunoassay	zCD71KOF	Phadia 250			k.A.						k.A.
Chlorid	Serum	Potentiometrie, indirekt	zCL	Atellica CH	+++	60 (konj.)	63,4 mmol/l	1 %	750	64,1 mmol/l	+++	3000	67 mmol/l
						60 (konj.)	96,6 mmol/l	1 %	750	100 mmol/l	+++	3000	105 mmol/l
						60 (unikonj.)	84,6 mmol/l	0 %					
						100 (unikonj.)	100 mmol/l	0 %					
Cholesterin	Serum	Absorptionsspektrometrie	zCHOL	Atellica CH	+++	60 (konj.)	126 mg/dl	8 %	500	162 mg/dl	++	1000	152 mg/dl
						60 (konj.)	223 mg/dl	-6 %	1000	244 mg/dl	++	1000	235 mg/dl
						20 (unikonj.)	186 mg/dl	2 %					
						20 (unikonj.)	291 mg/dl	0 %					
Cholinesterase (CHE)	Serum	Absorptionsspektrometrie	zCHE	Atellica CH	++	25 (konj.)	9461 U/L	1 %	500	9247 U/L	1 %	500	9421 U/L
						25 (konj.)	21.369 U/L	1 %	500	20.843 U/L	1 %	500	21.270 U/L
						25 (unikonj.)	3284 U/L	0 %					
						25 (unikonj.)	21.088 U/L	0 %					
Coeruloplasm	Serum	Immunturbidimetrie	zCOERAC	Atellica CH	-.+,+ +	bis 30	KSI	-.+,+ + +	bis 5000		KSI		bis 1000 (Triglyzeride)
Cortisol	Serum	Chemilumineszenz-IA	zCORTIS	Atellica IM	-.+	bis 20 (konj.)	KSI	-.+	bis 500		KSI		bis 1170 (Triglyzeride)
						bis 20 (unikonj.)	KSI	-.+	bis 500		KSI		
Cortisol (Speichel)	Speichel	Chemilumineszenz-IA	zSCORTIS	IDS Sys			KSI		bis 200		KSI		bis 600
C-Peptid	Serum	Chemilumineszenz-IA	zCPPTID	IMMULITE-2000 XR	+++	bis 200 (konj./unikonj.)	12 ng/ml	ca. -20 %	bis 500		KSI		bis 3000
Creatinkinase	Serum	Absorptionsspektrometrie	zCK	Atellica CH	+++	60 (konj.)	85 U/L	0 %	125	100 U/L	++	1000	97 U/L
						60 (konj.)	242 U/L	0 %	125	289 U/L	3 %	1000	285 U/L
						60 (unikonj.)	97 U/L	-3 %					
						60 (unikonj.)	247 U/L	-2 %					
Creatinkinase-MB CRP-Sensitiv	Serum	Absorptionsspektrometrie	zCKMB	Atellica CH	-.+,+ +	bis 25 (konj./unikonj.)	KSI	+	stört ab 25		KSI		bis 900 (Triglyzeride)
CRP	Serum	Immunturbidimetrie	zCRPAC	Atellica CH	+++	30 (konj.)	0,43 mg/L	0 %	125	0,54 mg/L	-7 %	500	0,45 mg/L
						30 (konj.)	2,32 mg/L	1 %	500	2,51 mg/L	++	1000	4,52 mg/L
						30 (unikonj.)	0,53 mg/L	-4 %					
						30 (unikonj.)	2,41 mg/L	2 %					
CRP	Serum	Immunturbidimetrie	zCRP	Atellica CH	+++	60 (konj.)	0,9 mg/dl	0 %	750	1,0 mg/dl	-4 %	1000	1,0 mg/dl
						60 (konj.)	3,4 mg/dl	0 %	1000	3,9 mg/dl	++	1000	3,9 mg/dl
						60 (unikonj.)	1,0 mg/dl	0 %					
						60 (unikonj.)	3,7 mg/dl	2 %					
Cyclosporin A	Kalium-EDTA-Blut	Enzymimmunoassay	zCSADZL	DIMENSION Xpand	+++	60 (konj.)	1,02 mg/l	3,9 %	1000	1,03 mg/l	-5,8 %		
Cyclosporin A	Kalium-EDTA-Blut	Enzymimmunoassay	zCSA	DIMENSION Xpand	+++	60 (konj.)	3,16 mg/l	1,6 %	1000	3,10 mg/l	-2,9 %		
Cystatin C	Serum	Immunturbidimetrie	zCYSAC	Atellica CH	+++	60 (konj.)	1,02 mg/l	2,0 %					
						60 (unikonj.)	3,18 mg/l	0,6 %					
DHEA-SO 4 (DHEAS)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zDHEAS	IMMULITE-2000 XR	+	bis 200	KSI		bis 375		KSI	+++++	1000000
Digiloxin	Serum	Chemilumineszenz-IA	zDGTAXI	Atellica IM	-.+	bis 20	5 ng/ml	KSI	-.+,+ + + +	1000	5 ng/ml	KSI	bis 5000 (Triglyzeride)
						25 ng/ml	KSI			1000	25 ng/ml	KSI	
						50 ng/ml	KSI			1000	50 ng/ml	KSI	
Digoxin	Serum	Enzymimmunoassay	zDGN	DIMENSION Xpand	+	80	2,16 ng/ml	<10 %	1000	2,16 ng/ml	<10 %	1000	2,33 ng/ml
						80	2,16 ng/ml	<10 %	1000	2,16 ng/ml	<10 %	1000	2,33 ng/ml
						80	2,16 ng/ml	<10 %	1000	2,16 ng/ml	<10 %	1000	2,33 ng/ml
Eisen	Serum	Absorptionsspektrometrie	zFE	Atellica CH	+++	50 (konj.)	51 µg/dl	1 %			stört	+	500
						50 (konj.)	161 µg/dl	0 %				+	500
						50 (unikonj.)	50 µg/dl	6 %				+	500
						50 (unikonj.)	159 µg/dl	-3 %				+	500
Eosinophiles kationisches Protein	Serum	Chemilumineszenz-IA	zAAEO	IMMULITE-2000 XR	+	bis 200 (konj./unikonj.)	KSI		135	7,38 ng/ml	ca. 25 %		bis 3000 (Triglyzeride)
Ethanol	Serum	Absorptionsspektrometrie	zALK	DIMENSION Xpand	+++	80 (konj.)	96 mg/dl	<10 %	1000	100 mg/dl	<10 %	3000	102 mg/dl
Ferritin	Serum	Chemilumineszenz-IA	zFERRAI	Atellica IM	+++	60 (konj.)	22,9 ng/ml	-2 %	900	50,2 ng/ml	0 %	+++	2000
						60 (unikonj.)	47,2 ng/ml	-4 %	900	47,2 ng/ml	-2 %	+++	2000
						60 (unikonj.)	22,6 ng/ml	1 %				+++	2000
						60 (unikonj.)	22,24 mg/dl	0 %				+++	2000
Folat	Serum	Chemilumineszenz-IA	zFOLAI	Atellica IM	+	20 (konj.)	3,8 ng/ml	0,1 %			KSI	+++	2000
						20 (konj.)	9,5 ng/ml	9,1 %				+++	2000
						20 (unikonj.)	3,6 ng/ml	-5,3 %					
						20 (unikonj.)	9,8 ng/ml	-1,5 %					
Freie Leichte Kette Kappa	Serum	Immunnephelometrie	zKAPSBN	BN-Prospec	+	bis 20	-6,2 %		bis 500		7,8%		bis 1930 Formazin-Tribunoseninheiten
Freie Leichte Kette Lambda	Serum	Immunnephelometrie	zLAMSBN	BN-Prospec	+	bis 20	-0,66 %		bis 500		-8,2 %		bis 1930 Formazin-Tribunoseninheiten
Freies Thyroxin (FT4)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zFT4	Atellica IM	-.+	bis 20	KSI	-.+,+ +	300		KSI		1000 (Triglyzeride)
Freies Triiodthyronin (FT3)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zFT3	Atellica IM	+	20 (konj.)	1,69 pg/ml	2 %	500	1,67 pg/ml	3 %	+	1000
						20 (konj.)	3,42 pg/ml	0 %	500	3,22 pg/ml	2 %	+	1000
						20 (unikonj.)	1,73 pg/ml	3 %					
						20 (unikonj.)	3,38 pg/ml	5 %					
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zFSH	Atellica IM	+	20 (konj.)	4,5 mIU/ml	5 %	150	4,6 mIU/ml	1 %	+	500
						20 (konj.)	40,2 mIU/ml	-3 %	150	40,1 mIU/ml	3 %	+	500
						20 (unikonj.)	4,7 mIU/ml	-5 %					
						20 (unikonj.)	39,3 mIU/ml	-1 %					
Gallensäure	Serum	Absorptionsspektrometrie	zGALLAC2	Atellica CH	++	bis 22,4 (konj.)	KSI	+++	bis 1000		KSI	++	bis 750 (bthalp/dl)
Gamma-Glutamyl-Transferase (GGT)	Serum	Absorptionsspektrometrie	zGGT	Atellica CH	+	10 (konj.)	56 U/L	4 %	750	53 U/L	9 %	+	500
						10 (konj.)	382 U/L	2 %	1000	376 U/L	3 %	+	500
						10 (unikonj.)	56 U/L	-2 %					
						10 (unikonj.)	373 U/L	1 %					
Gentamycin	Serum	Immunturbidimetrie (PETINIA)	zGENTAC	Atellica CH	+	20 (konj.)	4,1 µg/ml	2 %	500	4,1 µg/ml	1 %	++++	1000
						20 (konj.)	10,4 µg/ml	0 %	500	10,3 µg/ml	2 %	+	1000
						20 (unikonj.)	4,1 µg/ml	-1 %					
						20 (unikonj.)	10,2 µg/ml	1 %					
Gesamt-Eiweiß	Serum	Absorptionsspektrometrie	zGE	Atellica CH	++	25 (konj.)	6,1 g/dl	-1 %	500	6,1 g/dl	6 %	+	500
						25 (konj.)	8,9 g/dl	-1 %	500	8,1 g/dl	4 %	+	500
						25 (unikonj.)	5,9 g/dl	2 %					
						25 (unikonj.)	7,8 g/dl	1 %					
Gesamt-Eiweiß	Liquor	Absorptionsspektrometrie	zLGE	DIMENSION Xpand	+	20	KSI				K.A.		K.A.
Gesamt-Triiodthyronin (T3)	Serum	Chemilumineszenz-IA	zT3	Atellica IM	+	20 (konj.)	1,28 ng/ml	-1 %	250	1,30 ng/ml	-3 %	++	1000
						20 (konj.)	4,47 ng/ml	2 %	250	4,88 ng/ml	-1 %	++	1000
						20 (unikonj.)	1,34 ng/ml	-4 %					
						20 (unikonj.)	4,45 ng/ml	3 %					
Glukose	Serum	Absorptionsspektrometrie	zGLUS	Atellica CH	++	30 (konj.)	85 mg/dl	-1 %	1000	82 mg/dl	4 %	++	1000
						30 (konj.)	124 mg/dl	2 %	1000	117 mg/dl	3 %	++	1000
						30 (unikonj.)	84 mg/dl	1 %					
						30 (unikonj.)	123 mg/dl	1 %					
Glukose	Liquor	Absorptionsspektrometrie	zGLU	DIMENSION Xpand	+++	60 (konj.)	50 mg/dl	13 %	1000	50 mg/dl	-11 %		200
Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)	Serum	Absorptionsspektrometrie	zGLDH	DIMENSION Xpand	+++ + + +	bis 50	KSI	-.+,+ +	bis 500		KSI		stört
Haptoglobin	Serum												

<b>HCG-betaHCG</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zHCGCC	Atellica IM	++	40 (konj.)	17,3 mIU/ml	-3,7 %	++	500	17,6 mIU/ml	-4,4 %	++++	3000	17,2 mIU/ml	5,2 %	
					++	40 (konj.)	457,3 mIU/ml	-0,5 %	++	500	473,6 mIU/ml	-0,2 %					KSI
					++	40 (unkonj.)	17,1 mIU/ml	-1,2 %									
++	40 (unkonj.)	461,9 mIU/ml	-0,4 %									1000	436,1 mIU/ml	0,0 %			
<b>HCG-betaHCG (Siemens-immulte)</b> <b>HDL-Cholesterin</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zHCGI	Atellica CH	++	bis 200		KSI	++	bis 384		KSI		bis 3000		KSI	
					++	30 (konj.)	33,1 mg/dl	6 %	++	500	36,1 mg/dl	7 %	++	1000	34,5 mg/dl	1 %	
					++	30 (unkonj.)	66,3 mg/dl	-5 %		500	70,7 mg/dl	4 %		1000	68,8 mg/dl	1 %	
					++	30 (unkonj.)	35,6 mg/dl	-1 %									
					++	30 (unkonj.)	70,2 mg/dl	0 %									
<b>Homocystein</b>	Serum, Kalium-EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-IA	zHOMOC	Atellica IM	-,+	bis 25		< 10 %	-,+	1000		< 10 %	-,+	1300		< 10 %	
																Protein bis 6,5 g/dl < 10 %	
<b>IgE (spezifisch)</b> <b>IgE (Gesamt)</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zAAUN	IMMULITE-2000 XR	++	bis 200 (konj./unkonj.)		KSI		bis 500		KSI		bis 3000 (Triglyzeride)		KSI	
					++	bis 200 (konj./unkonj.)		KSI		bis 384		KSI		bis 5000 (Triglyzeride)		KSI	
<b>IgG IFPI</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIGS5P	IDS Sys	++	bis 200		KSI	++	bis 500		KSI		bis 3000		KSI	
<b>IgG-1</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIGF1D	IDS Sys	++	bis 20		KSI	++	bis 500		KSI		bis 3000		KSI	
<b>IgG (spezifisch)</b> <b>IgG-Subklasse 1</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIGS1SN	BN-II	++	bis 200 (konj./unkonj.)		KSI	++	bis 522		KSI		bis 3000 (Triglyzeride)		KSI	
					++	bis 200 (konj./unkonj.)		KSI									
<b>IgG-Subklasse 2</b>	Serum	Immunelektrophorese	zIGS2SN	BN-II				K.A.								K.A.	
<b>IgG-Subklasse 3</b>	Serum	Immunelektrophorese	zIGS3SN	BN-II				K.A.									K.A.
<b>IgG-Subklasse 4</b>	Serum	Immunelektrophorese	zIGS4SN	BN-II				K.A.									K.A.
<b>Immunkonfektion</b>	Urin	Immunelektrophorese	zIFURIX	Hydras				K.A.									K.A.
<b>Immunkonfektion</b>	Serum	Immunelektrophorese	zPFIFX zPFIFX2	Hydras				K.A.									K.A.
<b>Immunglobulin A</b>	Serum	Immunturbidimetrie	zIGASAC	Atellica CH	+++	50 (konj.)	56,4 mg/dl	-1 %	+++	1000	57,4 mg/dl	-5 %		922 (Triglyzeride)	50,8 mg/dl	9 %	
					+++	25 (konj.)	391,8 mg/dl	-1 %	+++	500	406,7 mg/dl	-1 %		500 (Intrapolipid)	406,7 mg/dl	3 %	
					+++	25 (unkonj.)	58,4 mg/dl	0 %									
					+++	25 (unkonj.)	407,1 mg/dl	0 %									
<b>Immunglobulin A</b>	Liquor	Immunelektrophorese	zIGAS	BN-Prosep		bis 60		KSI		bis 1000		KSI		bis 1920 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Immunglobulin A</b>	Serum zum Liquor	Immunelektrophorese	zIGASBN	BN-II		bis 60		KSI		bis 1000		KSI		bis 5700 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Immunglobulin A</b>	Serum	Immunelektrophorese	zIGASBN	BN-II	+++	50 (konj.)	498 mg/dl	2 %	+++	1000	509 mg/dl	-1 %	++	1000	516 mg/dl	5 %	
<b>Immunglobulin G</b>	Serum/Urin	Immunturbidimetrie	zIGGSAC	Atellica CH	+++	50 (konj.)	1954 mg/dl	-1 %	+++	1000	2114 mg/dl	-2 %	++	1000	1959 mg/dl	-1 %	
					+++	50 (unkonj.)	514 mg/dl	-1 %									
					+++	50 (unkonj.)	1890 mg/dl	-2 %									
<b>Immunglobulin G</b>	Liquor	Immunelektrophorese	zLIGG	BN-Prosep		bis 60		KSI		1000		KSI		bis 1900 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Immunglobulin G</b>	Serum zum Liquor	Immunelektrophorese	zLIGGS	BN-Prosep		bis 60		KSI		1000		KSI		bis 1900 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Immunglobulin M</b>	Serum	Immunelektrophorese	zLIGMS	BN-II		bis 60		KSI		1000		KSI		bis 1900 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Immunglobulin M</b>	Liquor	Immunelektrophorese	zLIGM	BN-Prosep		bis 60		KSI		1000		KSI		bis 1900 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Immunglobulin M</b>	Serum zum Liquor	Immunelektrophorese	zLIGMS	BN-Prosep		bis 60		KSI		1000		KSI		bis 1900 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Immunglobulin-Leichtketten (Kappa)</b>	Serum	Immunelektrophorese	zKAPSN	BN-II				K.A.									K.A.
<b>Immunglobulin-Leichtketten (Lambda)</b>	Serum/Urin	Immunelektrophorese	zLAMSN	BN-II				K.A.									K.A.
<b>Immunglobulin E</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIGEAI	Atellica IM	++	bis 20		KSI	-,+	500		KSI		3000 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Immunglobulin E</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIGSAC	Atellica CH	+++	60 (konj.)	58,9 mg/dl	-1 %	+++	1000	63,2 mg/dl	-4 %	++	1000	63,2 mg/dl	1 %	
					+++	60 (konj.)	27,2 mg/dl	-1 %	+++	1000	268,9 mg/dl	-1 %	++	1000	5278,2 mg/dl	-1 %	
					+++	60 (unkonj.)	83,1 mg/dl	-2 %									
					+++	60 (unkonj.)	273,2 mg/dl	0 %									
<b>Inhalationscreen</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zAAT	IMMULITE-2000 XR		bis 200 (konj./unkonj.)		KSI		bis 500		KSI		bis 3000 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Insulin</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIFUSULIN	IMMULITE-2000 XR		bis 200 (konj./unkonj.)		KSI		bis 550		KSI		bis 3000 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Intaktes Parathormon (PTH)</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zPTHGN	Atellica IM	+++	60 (konj.)	15,8 pg/ml	-3 %	+++	500	16,8 pg/ml	-3 %	++	1000	16,7 pg/ml	4 %	
					+++	60 (konj.)	427,8 pg/ml	-6 %	++	500	402,2 pg/ml	-1 %	++	1000	404,9 pg/ml	3 %	
					+++	60 (unkonj.)	16,2 pg/ml	-1 %									
					+++	60 (unkonj.)	379,2 pg/ml	1 %									
<b>Interleukin 6</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIL6AI	Atellica IM	++	25 (konj.)	8,4-10,6 pg/ml	10 %	+++	1000	8,4-10,6 pg/ml	-10 %	+++	1500	8,4-10,6 pg/ml	8 %	
					++	25 (konj.)	99,8-123,4 pg/ml	-2 %	+++	1000	99,8-123,4 pg/ml	-9 %	+++	1500	99,8-123,4 pg/ml	4 %	
					+++	60 (konj.)	8,4-10,6 pg/ml	-7 %									
					+++	60 (konj.)	99,8-123,4 pg/ml	-9 %									
<b>Interleukin 6</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIL6	IMMULITE-2000 XR		bis 200 (konj./unkonj.)		KSI		bis 550		KSI		bis 3000 (Triglyzeride)		KSI	
<b>IL-2-Rezeptor</b>	Serum	Chemilumineszenz-IA	zIL-2R	IMMULITE-2000 XR		bis 200		KSI		bis 512		KSI		bis 3000 (Triglyzeride)		KSI	
<b>Kalium</b>	Serum	Potentiometrie, indirekt	zK	Atellica CH	+++	60 (konj.)	2,72 mmol/l		-	500			+++	3000	2,87 mmol/l	4 %	
					+++	60 (konj.)	4,62 mmol/l						+++	3000	4,84 mmol/l	2 %	
					+++	60 (unkonj.)	2,73 mmol/l						+++	3000	4,84 mmol/l	2 %	
					+++	60 (unkonj.)	4,61 mmol/l						+++	3000	4,84 mmol/l	2 %	
<b>Kreatinin</b>	Serum, Urin	Absorptionsspektrometrie	zKREA / zUKR	Atellica CH	+	20 (konj.)	1,61 mg/dl	-7,3 %	++	500	1,53 mg/dl	4,4 %	+	500	1,55 mg/dl	-1,1 %	
					+	20 (konj.)	5,32 mg/dl	-2 %	++	500	5,07 mg/dl	1,8 %	+	500	5,23 mg/dl	-1,2 %	
					+	10 (unkonj.)	1,62 mg/dl	2,5 %									
					+	15 (unkonj.)	5,32 mg/dl	-1,3 %									
<b>Kreatinin, enzymatisch</b>	Serum, Urin	Absorptionsspektrometrie	zKREA / zUKRE	Atellica CH	++	30 (konj.)	1,59 mg/dl	-5 %	++++	750	1,72 mg/dl	4%	++	1000	1,72 mg/dl	0 %	
					++	30 (konj.)	5,38 mg/dl	-4 %		750	5,70 mg/dl	2%	++	1000	5,17 mg/dl	-2 %	
					++	30 (unkonj.)	1,58 mg/dl	-2 %									
					++	30 (unkonj.)	5,36 mg/dl	-2 %									
<b>Lactat</b>	NaF-Plasma	Absorptionsspektrometrie	zLAC	Atellica CH	+	5,15 (konj.)	6,3 mg/dl	-1 %	+	300	6,6 mg/dl	-8 %	++	1000	6,1 mg/dl	2 %	
					+	9,2 (konj.)	23,4 mg/dl	-4 %	+++	1000	22,6 mg/dl	-10 %	++	1000	22,6 mg/dl	-2 %	
					+	3,75 (unkonj.)	6,6 mg/dl	-8 %									
					+	7,5 (unkonj.)	23,4 mg/dl	-3 %									
<b>Lactat</b>	Liquor	Absorptionsspektrometrie	zLLAC	DIMENSION Xpand		20	2,88 mmol/l			1000	2,97 mmol/l			1000	1,66 mmol/l		KSI
						40	2,88 mmol/l										
<b>Lactat-Dehydrogenase</b>	Serum	Absorptionsspektrometrie	zLDH	Atellica CH	++	30 (konj.)	121 U/L	-3 %				stort	++	650	122 U/L	1 %	
					++	30 (konj.)	472 U/L	-1 %					++	850	477 U/L	2 %	
					++	30 (unkonj.)	120 U/L	1 %									
					++	30 (unkonj.)	470 U/L	1 %									
<b>LDL-Cholesterin</b>	Serum	Absorptionsspektrometrie	zLDL	Atellica CH	++	20 (konj.)	89,1 mg/dl	-2 %	+++	810	90,2 mg/dl	9 %	+	505	88,9 mg/dl	-5 %	
					++	20 (konj.)	286,8 mg/dl	2 %	+++	810	296,8 mg/dl	3 %	+	505	296,4 mg/dl	4 %	
					++	30 (unkonj.)	91,1 mg/dl	2 %									
					++	30 (unkonj.)	307,5 mg/dl	0 %									
<b>Lipase</b>	Serum	Absorptionsspektrometrie	zLIP	Atellica CH	+++	25 (konj.)	54 U/L	3 %	+	200	50 U/L	7 %	++	1000	52 U/L	10 %	
					+++	25 (konj.)	254 U/L	1 %	++	500	251 U/L	-2 %	++	1000	250 U/L	-3 %	
					+++	25 (unkonj.)	51 U/L	-1 %									
					+++	25 (unkonj.)	234 U/L	6 %									
<b>Lipoprotein</b>	Serum	Immunturbidimetrie	zLPA	Atellica CH	+++	60 (konj.)	14,70 mg/dl	<1 %	+++	1000	18,40 mg/dl	-5 %					



Table containing 20 columns of clinical data including reagent names (e.g., zPARAAC, zPHEBAC), patient types (Serum, Urin), measurement methods (Absorptionsspektrometrie, Immunturbidimetrie), and HIL indices with associated values and reference ranges.